

**Стоматологічний протравлювач для протравлювання зубної емалі та дентину**

Упаковка: 50 мл шприци + 5 аплікаторів, перехідник, 3 дозатори

Склад: 36% ортофосфорна кислота, гелева основа, барвники

Застосування:

Препарат використовується для протравлювання емалі і дентину перед застосуванням комбінованих матеріалів, лаків для борозден і щілин.

Підготовка виробу для застосування:

1. Відкрити білу закрутку з основного шприца, що містить протравлювач
2. На місце білої закрутки вкрути перехідник
3. Відкрутити голубу заглушку з перехідника і на її місце вкрутити дозатор – доданий менший шприц.
4. Натиснути поршень основного шприца і перекачай необхідну кількість гелю до дозатора, не більше 2 мл.
5. Відкрути наповнений дозатор і накрути на його кінець аплікатор (додану тупу голку). Препарат готовий до застосування.
6. Перехідник залиши закріпленим на основному шприці і закрій голубою заглушкою.

Спосіб застосування:

На осушену поверхню накласти тонкий шар протравлювача. Протравлювати не довше, ніж 60 секунд. Промити сильним струменем водно-повітряним (близько 15-20 секунд). Не пересушувати! У випадку забруднення емалі процес повторити.

Препарат служить для багаторазового застосування, але аплікатори є одноразовими.

Застереження:

Може викликати подразнення шкіри.

Діє подразливо на слизову оболонку ротової порожнини. У разі контакту негайно прополоскати водою.

Препарат має подразливу дію на очі. У випадку контакту – негайно промити великою кількістю води і звернутись до лікаря.

У випадку ковтання не спричиняти блювання. Випити велику кількість води. Звернутись до лікаря.

Засоби безпеки:

Під час роботи з препаратом використовувати кофердам /захисну пов'язку/.

Використовувати рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.

Протипоказання:

Не застосовувати у пацієнтів з надчутливістю до складників препарату.

Умови зберігання:

Зберігати в щільній упаковці, у провітрюваному приміщенні при температурі 2-25 °С.

Берегти від дії сонячних променів.

Зберігати у місці, недоступному дітям.

Використану упаковку утилізувати або повернути виробникові.

ПРЕПАРАТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ - СТОМАТОЛОГАМИ



Виробник

PPH CERKAMED Войцех Павловскі  
37-450 Стальова Воля, Польща  
Вул. Квятковського, 1  
Тел./факс 0048 15 842-35-85

